

EsteticPen – urządzenie do mezoterapii mikro i nanoigłowej

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ładowanie

W celu naładowania urządzenia należy umieścić kabel zasilający w gnieździe DC, a następnie należy umieścić zasilacz w gniazdku sieciowym. Zielona lampka symbolizuje całkowite naładowanie. Lamka czerwona sygnalizuje ładowanie.

2. Przygotowanie urządzenia do zabiegu

Kartridż należy wyjąć z opakowania i umieścić w urządzeniu poziomo i wepchnąć do końca. Aby zablokować kartridż należy przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Długość igieł jest regulowana po włączeniu urządzenia.

Aby usunąć kartridż należy obrócić go w prawo i wyjąć.

3. Regulacja prędkości

Aby uruchomić urządzenie należy dłużej przytrzymać przycisk (ok 3 sekundy). Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku startowego będą zwiększały szybkość urządzenia od 1-6.

Aby wyłączyć urządzenie należy dłużej przytrzymać włącznik(ok 3 sekundy)

4. Regulacja długości igieł

Długość igieł ustalamy obracając pierścieniem ze skalą długości.

PROTOKÓŁ ZABIEGU

1. Dokładnie oczyszczamy skórę
2. Peeling enzymatyczny lub ziarnisty w celu usunięcia martwego naskórka
3. Aplikacja kremu znieczulającego w przypadku intensywnej kuracji. Ok 15-30 minut
4. Zmycie kremu znieczulającego
5. Dezynfekujemy skórę przy pomocy Inno-Derma Degreasing Solution
6. Aplikujemy odpowiednio dobrany koktajl z gamy Inno-TDS
7. Dobieramy długość igieł oraz szybkość pracy urządzenia. Pracując na długościach do 0,5 mm nie odrywamy kartridża od skóry, natomiast od długości 0,75 mm pracujemy stemplowo. Tabela doboru długości poniżej.
8. Nakłuwamy obszar poddawany zabiegowi.
9. Nakładamy cienką warstwę Inno-Exfo Refresh Mask i pozostawiamy do wchłonięcia.
10. Nakładamy krem regenerujący Inno-Derma Skin Repair.

Obszar	Długość igieł	
	Skóra cienka	Skóra normalna, gruba
Czoło	0,25-05 mm	0,5-0,75 mm
Lwia zmarszczka	0,25-05 mm	0,5-1,0 mm
Nos	0,25 mm	0,5 mm
Okolice oczu	0,25 mm	0,25 mm
Kości policzkowe	0,5 mm	0,5-1,0 mm
Policzki i podbródek	0,5-1,0 mm	1,0-2,0 mm
Okolica ust	0,25 mm	0,5-1,0 mm
Usta	0,25 mm	0,25 mm
Blizny na twarzy	1,0-1,25 mm	1,5-2,0 mm
Rozstępy	1,0-1,5 mm	1,5-2,5 mm
Głębokie blizny	2,0-2,5 mm	2,2-2,5 mm

Długość igieł	Prędkość
Poniżej 0,5 mm	S-1
0,50-0,75 mm	1-2
0,75-1,25 mm	2-3
1,25-1,50 mm	3-4
1,50-2,50 mm	5-H