

mesohyal™ meso-lift

ULTRA HYDRALIFTING

mesohyal™ NCTC 109 + KWAS HIALURONOWY

REKOMENDOWANY
MESOHYAL™
MESOESTETIC®

SKŁAD
I POJEMNOŚĆ

UNIKALNE
CECHY MESOHYAL™

DZIAŁANIE

EFEKTY
TERAPEUTYCZNE
MESO-LIFT

mesohyal™
NCTC 109

POJEMNOŚĆ:
5 fiolek x 5 ml

SKŁAD:

kwasy
hialuronowe
0,025 mg/ml
0,125 mg/fiolka
11 witamin
23 aminokwasy
6 soli
mineralnych
3 koenzymy

- gotowy koktajl substancji aktywnych, stanowiący naturalny stymulator wzrostu komórkowego (NCTC = New Cellular Treating Complex)
- zawiera kwas hialuronowy w stężeniu endogennym, naturalnie występującym w młodej skórze
- certyfikacje (CE) potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo

- kompleks specjalnie dobranych składników aktywnych MESOHYAL™ NCTC 109 uzupełnia ich niedobory w tkance łącznej skóry
- MESOHYAL™ NCTC 109 dostarcza substancji regulujących procesy metaboliczne i stanowiących kofaktory reakcji enzymatycznych
- synergia działania kwasu hialuronowego i substancji aktywnych MESOHYAL™ NCTC 109 w unikalny sposób wpływa na pobudzenie i intensyfikację procesów naprawczych i produkcyjnych skóry (biorewitalizacja)

- Efekt hydra-liftingu, mikrowypełnienia i ujędrnienia skóry
- natychmiastowy i długotrwały efekt rozświetlenia skóry
- doskonałe nawilżenie powierzchniowych i głębokich warstw skóry
- redukcja zmarszczek i intensywne wygładzenie powierzchni skóry = naturalny, młody wygląd

mesohyal™
KWAS
HIALURONOWY

POJEMNOŚĆ:
5 fiolek
x 3 ml

SKŁAD:

kwasy
hialuronowe:
15 mg/ml
45 mg/
fiolka

- kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej: 2 mln Da
- wysoki współczynnik gęstości i lepkości preparatu
- wysoka koncentracja kwasu hialuronowego
- certyfikacja (CE) potwierdzająca skuteczność i bezpieczeństwo

- unikalne cechy KWASU HIALURONOWEGO MESOHYAL™ sprzyjają długotrwałemu zatrzymywaniu dużej ilości wody w skórze, wydłużają okres półtrwania
- wielkocząsteczkowy KWAS HIALURONOWY MESOHYAL™ wypełnia przestrzenie międzykomórkowe i stanowi tkankowy rezerwuuar wody aktywnej metabolicznie, gwarantując prawidłowy przebieg procesów biochemicznych skóry, w szczególności procesów regeneracyjnych i naprawczych

PROTOKÓŁ WYKONANIA ZABIEGU

1. Wykonać demakijaż przy użyciu **HYDRA MILK CLEANSER MESOESTETIC®** i stonizować skórę przy użyciu **HYDRA TONIC MESOESTETIC®**.
2. Zdezynfekować obszar zabiegowy.
3. Przygotować koktajl do mezoterapii.
 - A. Do fiolki **MESOHYAL™ HIALURONIC KWAS HIALURONOWY MESOESTETIC®** 3 ml wprowadzić 5 ml roztworu **MESOHYAL™ NCTC 109 MESOESTETIC®**.
 - B. Delikatnie wstrząsnąć fiolką w celu dokładnego połączenia komponentów koktajlu.
 - C. Koktajl **MESOHYAL HIALURONIC KWAS HIALURONOWY+ MESOHYAL™ NCTC 109** jest gotowy do użycia. Otrzymana objętość roztworu może być wykorzystana do zabiegu u jednego pacjenta (twarz, szyja, dekolt, grzbiety dłoni – zabieg **global meso-lift**) lub u dwóch pacjentów (twarz, szyja dekolt – **zabieg meso-lift**).

Zawartość składników aktywnych w koktajlu:

- kwas hialuronowy o zróżnicowanej masie cząsteczkowej: 45,125 mg / 8 ml koktajlu
- kompleks 43 substancji aktywnych

4. Wykonać mezoterapię igłową z wykorzystaniem przygotowanego koktajlu, dostosowując technikę iniekcji do wskazań oraz potrzeb skóry pacjenta. Istnieje możliwość wykorzystania techniki nappage, techniki punkt po punkcie lub techniki depozytowej.
5. Nałożyć na skórę maskę w płacie z włókien krystalicznych **CRYSTAL FIBER MASK MESOESTETIC®**, w celu wyciszenia i przywrócenia właściwych funkcji skóry.
8. Pozostawić **CRYSTAL FIBER MASK MESOESTETIC®** na skórze na 15-20 minut, a następnie usunąć płat ze skóry.
7. Zaaplikować na skórę krem z wysokim faktorem przeciwsłonecznym: **DERMATOLOGICAL SUN PROTECTION SPF 50+ MESOESTETIC®** (krem barwiony) lub **MOISTURIZING SUN PROTECTION SPF 50+ MESOESTETIC®**.

REKOMENDOWANY SCHEMAT ZABIEGÓW W SERII:

