

S-line

Charakterystyka

- Opakowanie: strzykawka 1x3ml + 2x30G igła
- Sterylizacja: filtracja aseptyczna
- Gotowy do użytku
- Przechowywanie: 2°C - 30°C
- Wolny od pirogenów
- Obojętne pH
- Roztwór izoosmolarny

Techniki iniekcji

- promienista
- liniowo-krzyżowa
- liniowa
- punkt po punkcie

Protokół

Iniekcja w średnie lub powierzchowne warstwy skóry.

Wypełnienie drobnych linii, poprawa efektu rozjaśnienia skóry

Obszar zabiegu: twarz, dekolt, grzbiety dłoni

Igła: 30G dostępna wraz z Cytocare S Line

Cykł zabiegowy: dla długotrwałych efektów 3 sesje co 3 tygodnie

Widoczne rezultaty terapii



Dr Jasmina Lalosevic M.D. | AestheticMed Belgrade-Serbia